


ШКАЛА VITA – ТОЧНЫЙ ПОМОЩНИК В ВЫБОРЕ ОТТЕНКА

Практически в каждой стоматологической клинике в распоряжении врача-стоматолога имеется классическая шкала определения цвета зубов Vita. В настоящее время стандартная шкала оттенков зубов Vita является золотым стандартом определения цвета зубов.

Разбираемся, как быстро и эффективно использовать шкалу Vita в своей практической деятельности.

Классическая цветовая палитра шкалы имеет 4 спектра цветов, подразделяющиеся на оттенки. Всего в шкале 16 оттенков.

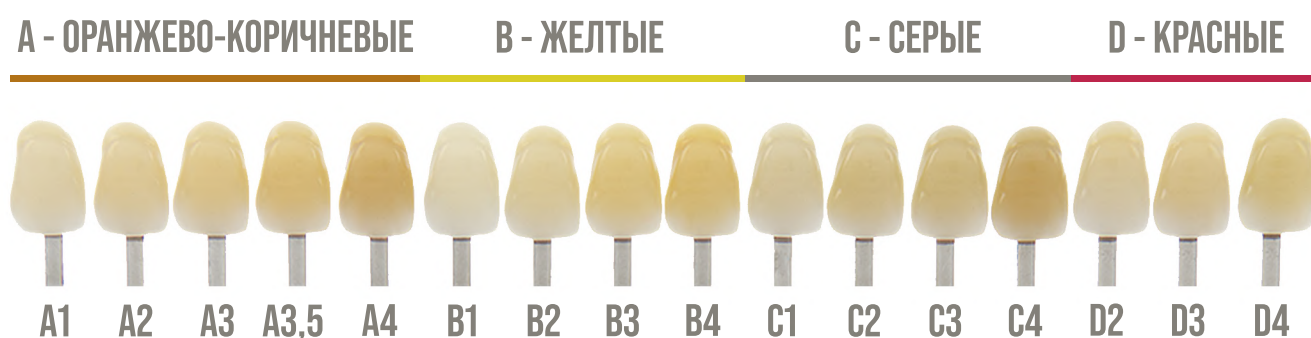

Наиболее важной характеристикой при выборе цвета является его яркость. Таким образом, расположение оттенков цветов по степени яркости позволяет врачу быстро и эффективно подобрать максимально приближенный к цвету зуба оттенок: в первую очередь врач выбирает яркость, после чего определяет подтон (A-D).

Цвета шкалы, расставленные по степени яркости:
B1-A1-B2-D2-A2-C1-C2-D4-A3-D3-B3-A3,5-B4-C3-A4-C4

Визуальная шкала определения цвета зуба Vita является своего рода подсказкой, помогающей специалистам достичь высокого эстетического результата.

Подробнее об использовании шкалы Vita смотрите в видео

[СМОТРЕТЬ](#)